

## DESCRITIVO TÉCNICO

### SensiVolk Medical

- Confeccionada em NITRILA - material sintético
- LIVRE das proteínas do látex natural
- Disponível nos tamanhos P, M, G e EG
- Não estéril | Isenta de pó/amido | Ambidestra
- CA: 40.135 , conforme ISO 11193-1, contra riscos biológicos
- Registro ANVISA 80189110017
- As luvas SensiVolk Medical atendem as legislações: RDC 56/2001, RDC 05/2008, RDC 24/2009, RDC 55/2011, RDC 16/2013, RDC 40/2015 e Portaria INMETRO 332/2012



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - ISO 11193-1 - Luvas para procedimentos não cirúrgicos, de uso único; ISO 13485 - Boas práticas de fabricação de produtos médicos

#### 1. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Inner)	DUN 14 (10 inners)
10.60.081.02--P	P	7898207217252	17898207217259
10.60.081.02--M	M	7898207217269	17898207217266
10.60.081.02--G	G	7898207218259	17898207218256
10.60.081.02--EG	EG	7898207218266	17898207218263

#### 2. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades e se o tamanho da luva está de acordo com a sua mão;

Para calçá-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à região do punho, calce-a cuidadosamente, em seguida, retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho. A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva;

Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho.

Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que a luva esteja quase totalmente removida.

A fim de evitar contaminações, continue segurando a luva removida e remova-a completamente. Para remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva. Gire seu dedo 180° e puxe-a ao avesso e em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro da segunda, o lado interno da segunda luva também será virado do avesso.

Pegue-as firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

#### 3. Precauções & Advertências

Produto de uso único;

Destruir após o uso;

Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;

Proibido reprocessar;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.