

DESCRIPTIVO TÉCNICO

NeoVolk Cirúrgica

- Confeccionada em CLOROPRENE - material sintético
- LIVRE das proteínas do látex natural
- FACILIDADE para vestir e tirar das mãos
- Superfície texturizada, para melhor aderência aos equipamentos
- Disponível nos tamanhos 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 e 9.0
- Estéril
- CA: 39.518, conforme ISO 10282:2005, contra riscos biológicos
- Registro ANVISA 80189110009
- As luvas NeoVolk Cirúrgica atendem as legislações: RDC 56/2001, RDC 05/2008, RDC 24/2009, RDC 55/2011, RDC 16/2013, RDC 40/2015 e Portaria INMETRO 332/2012

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - ISO 10282:2005 - Luvas estéreis de uso único; ISO 13485 - Boas práticas de fabricação de produtos médicos

1. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (50 pares)	DUN 14 (200 pares)
10.45.140.06--6.0	6.0	7898207218662	37898207218663	47898207218660
10.45.140.06--6.5	6.5	7898207218679	37898207218670	47898207218677
10.45.140.06--7.0	7.0	7898207218686	37898207218687	47898207218684
10.45.140.06--7.5	7.5	7898207218693	37898207218694	47898207218691
10.45.140.06--8.0	8.0	7898207218709	37898207218700	47898207218707
10.45.140.06--8.5	8.5	7898207218716	37898207218717	47898207218714
10.45.140.06--9.0	9.0	7898207218723	37898207218724	47898207218721

2. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; ou realize o procedimento operacional padrão pré-cirúrgico para higienização de partes do corpo antes de sua utilização. Evite o uso de anéis e/ou adornos que possam ocasionar furos e/ou rasgos nas luvas. Em caso de danos e/ou mudança de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas.

Abra a embalagem primária da luva estéril, pela aba, descolando totalmente a parte superior e em seguida as laterais, evitando tocar na parte sua interna, assim evitando possíveis contaminações na luva.

Deposite o envelope interno em um campo estéril, e em seguida, posicione-se em frente ao móvel a uma distância segura, para que não haja risco de contaminação.

Verifique o lado correto de cada luva, então abra o envelope interno, segurando-o pelas abas centrais, evitando que a parte externa do envelope toque as luvas, para que isso não ocorra, firme os dedos sobre as laterais internas e solte-as quando tiver certeza que ele não voltará a dobrar. Primeiramente, calce a mão dominante, segurando-a pela parte externa da dobra, vista-a calmamente, procurando alocar cada dedo no seu espaço correspondente dentro da luva, pare de calçá-la quando ela estiver no punho, mantendo a dobra. Em seguida, calce a luva na outra mão, com auxílio da mão já vestida, segure-a pela parte interna da dobra e deslize a mão para dentro da luva. Pare quando a dobra estiver desfeita, prestando atenção para evitar o contato da parte estéril da luva no antebraço. Corrija o posicionamento dos dedos da mão em ambas luvas. Desfaça a dobra da outra mão com segurança, sem encostar a parte estéril da luva no antebraço.

Após o procedimento, para retirá-las, inicie pela mão dominante, pegue uma luva próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre. Pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos. À medida que puxar, você estrá colocando a luva ao avesso. Continue puxando a dobra até que a luva esteja quase que totalmente removida. A fim de evitar contaminação do ambiente, continue a segurar a luva removida. A seguir, remova sua mão da luva completamente. Escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece. Continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que quase metade do dedo esteja sob a luva. Gire seu dedo a 180°C e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos seus dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva será contida dentro da segunda luva. O lado interno da segunda luva também será virada ao avesso. Pegue as luvas firmemente por meio da superfície não-contaminada (o lado que estava inicialmente tocando sua mão). Libere totalmente o contato com a primeira luva removida. A seguir retire sua segunda mão do contato com as luvas descartando-as adequadamente, conforme instruções de descarte de produtos infectados e/ou normas de saneamento da sua empresa ou hospital.

3. Precauções & Advertências

- Produto de uso único;
- Destruir após o uso;
- Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
- Proibido reprocessar;
- Estéril, enquanto a embalagem não for aberta e/ou danificada;
- Esterilizada por irradiação;
- Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;
- O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água, ou o procedimento pré-cirúrgico padrão.