

SENSI MEDICAL



CÓDIGO: 10.60.081.02

COR: Azul

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Nitrila

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA: 44.426 **Validade do CA:** 21/02/2028 **REGISTRO ANVISA:** 81981090012



DESCRIÇÃO

Luva de segurança para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em nitrila, sem pulverização de pó bioabsorvível, ponta dos dedos texturizadas, ambidestra, não estéril.



INDICADA PARA

Proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves (manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos corporais derramados, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, aferição de pressão arterial, temperatura ou pulso) e médios (contato com membrana mucosa, pele não-integra e sangue, inserção e/ou remoção de dispositivo intravenoso, coleta de sangue, exames vaginais e pélvicos), em hospitais, laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual ISO 11193-2:2013 - Luvas para procedimentos não cirúrgicos.



ISO 374:2019 - Riscos Químicos - Tipo B **CA: 44.426**

Produto Químico	Classe	Nível
Hidróxido de sódio 40%	K	6
Hidróxido de amônio 25%	O	2
Peróxido de hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

ISO 374:2019
Tipo B



EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
7 (P)	7898207217252	17898207217259
8 (M)	7898207217269	17898207217266
9 (G)	7898207218259	17898207218256
10 (EG)	7898207218266	17898207218263

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso;

Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas;

Para calçá-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à região do punho, calce-a cuidadosamente. Retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho; A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva; Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho. Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que a luva seja totalmente removida; Para a remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro da segunda, o lado interno da segunda luva também será virada do avesso; Pegue as luvas firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Produto de uso único;

Destruir após o uso;

Proibido reprocessar;

Não estéril;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

www.volkdobrasil.com.br

Atualizado em Julho de 2024