

VINIL MEDICAL



CÓDIGO: 10.81.076.11B

COR: Transparente

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Vinil

CA: 40.254 **VALIDADE DO CA:** 09/03/2027

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

REGISTRO ANVISA: 81981090001



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível, superfície lisa, ambidestra, não estéril.



INDICADA PARA

Indicada para a proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves (administração de medicação oral, remoção e/ou substituição de roupas de cama de pacientes, colocação de equipamento de ventilação não-invasiva e cânula de oxigênio) e médios (aferição de pressão arterial, temperatura ou pulso do paciente, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, administração de cuidados aos olhos e ouvidos - sem secreções, ao dar banho ou vestir pacientes) em hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual ISO 11193-2:2013 - Luvas para procedimentos não cirúrgicos.



EN 374:2019 - Riscos Químicos - Tipo B

| Produto Químico | Classe | Nível |
|----------------------------|--------|-------|
| Hidróxido de sódio 40% | K | 6 |
| Ácido sulfúrico 96% | L | 2 |
| Hidróxido de amônio 25% | O | 3 |
| Peróxido de hidrogênio 30% | P | 6 |
| Formaldeído 37% | T | 1 |

EN 374:2019
Tipo B



EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

| Tamanho | EAN13 (Inner com 100 peças) | DUN 14 (Caixa com 10 inners) |
|---------|-----------------------------|------------------------------|
| 7 (P) | 7898619332444 | 17898619332441 |
| 8 (M) | 7898619332451 | 17898619332458 |
| 9 (G) | 7898619332468 | 17898619332465 |
| 10 (EG) | 7898619332475 | 17898619332472 |

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
- Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso; Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas;
- Para calçá-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à

região do punho, calce-a cuidadosamente. Retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho; A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva; Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho. Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que a luva seja totalmente removida; Para a remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro da segunda, o lado interno da segunda luva também será virada do avesso; Pegue as luvas firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Produto de uso único;

Destruir após o uso;

Proibido reprocessar;

Não estéril;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

www.volkdobrasil.com.br

Atualizado em Outubro 2022