

ACESSÓRIOS**MÁSCARA TNT TRIPLA-E****CÓDIGO:** 20.35.107.06 - **COR:** Branca**CÓDIGO:** 20.35.107.07 - **COR:** Preta**CÓDIGO:** 20.35.107.20 - **COR:** Rosa**TAMANHOS:** U (Unico)**COMPOSIÇÃO:** TNT (Tecido Não Tecido)**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação**REGISTROS ANVISA:** 81981090019 (todas as cores) - 81981090017 (branca) - 81981090022 (branca)**DESCRIÇÃO**

Máscara confeccionada em TNT (Tecido Não Tecido) Tripla com elástico ou tiras. BFE > 95%.

Clipagem tripla;
Haste de clip para fixação no nariz.

Este produto não protege contra agentes agressivos, químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

**INDICADA PARA**

Indicadas como barreira de uso individual, para proteção do profissional de saúde contra infecções por inalação de gotículas transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue e/ou outros fluídos corpóreos, que possam atingir as vias respiratórias. Ideal para uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos e/ou odontológicos. Também indicada para atividades onde seja necessário proteção do produto como em processamento de carnes in natura, massas, chocolates, castanha e outros alimentos. Análise de qualidade, tratamento estético entre outros.

EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

| CÓDIGO | EAN 13 (Inner com 50 peças) | DUN 14 (Caixa com 40 inners) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 20.35.107.06 - Branca | 7898619334615 | 47898619334613 |
| 20.35.107.07 - Preta | 7898619339849 | 17898619339846 |
| 20.35.107.20 - Rosa | 7898619339856 | 17898619339853 |

INSTRUÇÕES DE USO

- Lave as mãos antes de manipular a máscara;
- Retire uma máscara de sua embalagem original;
- Dobre a máscara ao meio a fim de certificar-se do seu ajuste;
- Desdobre-a e coloque os elásticos/tiras sobre as duas orelhas e/ou na parte posterior da cabeça;
- Faça o ajuste correto da máscara sobre a boca e o nariz, para melhor conforto durante a realização da atividade;
- Faça a substituição quando as máscaras estiverem úmidas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Produto de uso único;
- Destruir após o uso;
- Proibido reprocessar;
- Não estéril;
- Se a integridade das máscaras estiver comprometida (por exemplo, por furos ou rasgos), elas devem ser trocadas assim que possível;

Descarte o produto em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI;

Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil do material.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

Para demais instruções/informações, acesse:



Telefone: (41) 2105-0055

sac@volkdo brasil.com.br

www.volkdo brasil.com.br

Atualizado em Agosto 2023